

Mamare

Protetor para seios com gel

Leia as instruções antes de utilizar Mamare.

Por que devo usar Mamare?

Mamare é um disco a base de gel e graças a sua composição oferece proteção (física) aos mamilos durante a gravidez e/ou amamentação. É absorvente, transparente, oferece frescor e alívio e ajuda a mãe que amamenta a relaxar.

Mamare absorve o excesso de líquido, reduzindo o amolecimento da pele saudável do mamilo. Mamare oferece ajuda extra para amortecer e proteger contra fricção nos mamilos e a forma de seu disco permite que fique perfeitamente acomodado dentro do sutiã sem precisar de proteção complementar.

Quais são os componentes do Mamare?

Mamare é composto de três componentes primários: água, glicerina e poliacrilamida;

A água proporciona o frescor e a sensação de alívio, quando o disco é aplicado;

A glicerina suaviza e ajuda a manter a pele suave e lisa, prevenindo contra o ressecamento;

A poliacrilamida mantém o disco íntegro e permite a absorção do líquido.

Durante quanto tempo devo utilizar o Mamare?

O tempo ideal de utilização do Mamare é determinado pela sua capacidade de adesão à pele. Com o encharcamento, essa adesividade diminui, o que indica a necessidade de substituição. Em condições normais – onde não haja um fluxo tão abundante de líquido – seu tempo de uso é de **três a sete dias**.

Como armazenar o Mamare?

Armazenar em temperatura ambiente (15º C e 30º C), ao abrigo da luz e umidade.


O produto não pode ser utilizado se a embalagem interna estiver aberta ou danificada.

Posso usar sabão para limpar os discos (Mamare)?


Sabões ou detergentes não podem ser utilizados, uma vez que podem comprometer a integridade do disco.

Limpe o disco com um pano úmido.


Como utilizar Mamare?

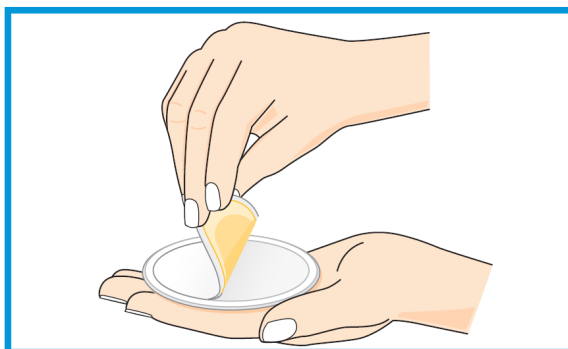


1. Abra a embalagem e retire o disco da base protetora. Guarde a base para armazenar o produto quando este não estiver em uso.

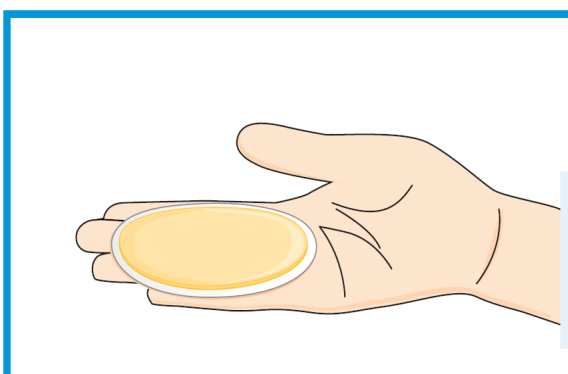

2. Aplique a parte com gel sobre a região do mamilo. A parte com a película de pano serve para evitar a adesão do disco ao sutiã, portanto, não deve ser retirada.

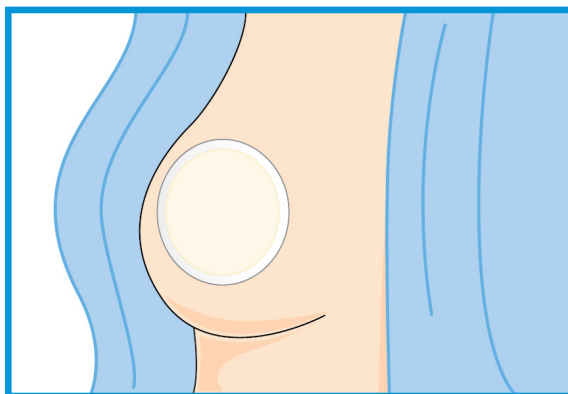

3. A forma do disco foi desenhada para se adaptar à região do mamilo e se encaixar dentro do sutiã. Não é necessário segurar o disco por outros meios.

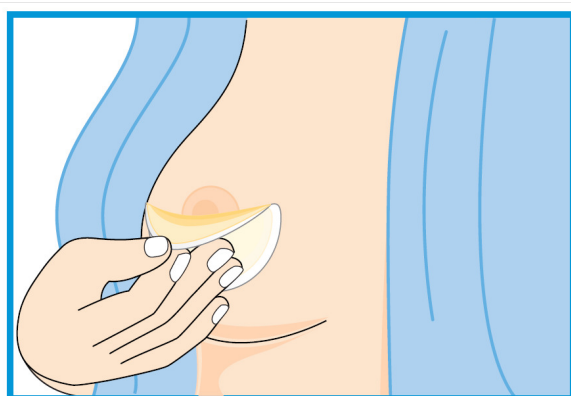

4. Quando for amamentar, retire o disco e coloque-o na geladeira; desta forma, quando o mesmo for reaplicado (pós-mamada) você terá a sensação de alívio e frescor.

Não utilize sabão nem detergente para lavar o disco, visto que esses produtos poderão afetar a sua integridade. Depois de amamentar várias vezes, verifique se o disco não perdeu a transparência, e se não há vestígios de leite. Caso isto ocorra, descarte o disco e utilize um novo. No geral o disco pode ser utilizado durante um período de 3 a 7 dias sem necessidade de troca.

N.º de lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE CARTUCHO.

MS: 8.0164.790.002

Farm. Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró - CRF-SP 19.258

Fabricado por: Southwest Technologies, Inc.
1746 Levee Road, North Kansas City

Importado por: Eurofarma Laboratórios LTDA.
Av. Ver. José Diniz, 3.465 - São Paulo - SP
CNPJ: 61.190.096/0001-92 - **Indústria Brasileira**